

# Das Auffüllen mit Wasser


Siehe „Befüllungstabelle“ (unten) bzgl. der zu verwendenden Wassermenge.

**1** **Zweifach verwendbarer Trichter:**  
Als Schraubenschlüssel zum Lösen des Deckels



Einfach aufzuschrauben

**2** **Ein Trichter zur Wasserbefüllung**

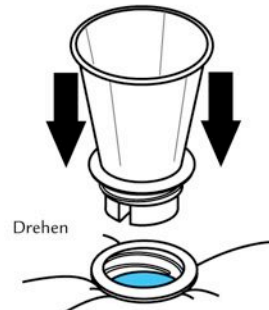

Drehen

Den Trichter in die Ventilöffnung setzen, festziehen und mit Wasser befüllen

**3** **Das Kissen aufrecht auf einen Stuhl stellen.**




Füllmenge siehe Tabelle

# Wie man die Restluft entfernt

Nachdem der Trichter entfernt wurde, mit den Schritten 4-7 fortfahren.

**4**

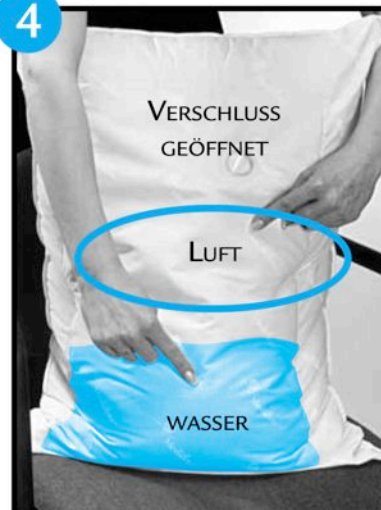

Im Beutel befinden sich nun Wasser und Luft.

## Sehr wichtig!

Für optimalen Schlafkomfort muss die Restluft aus dem Wasserbeutel entfernt werden. Damit eingefülltes Wasser nicht auslaufen kann, halten Sie das Kissen aufrecht und befolgen Sie die Schritte 5 bis 7!

## Sonderhinweis!

Wenn Sie Ihren Kopf auf das Kissen legen und im Inneren ein Schwappen hören, wiederholen Sie die Schritte 5-7, um die restliche Luft zu entfernen.

**5**



Drücken Sie mit beiden Händen in das Kissen, damit die Luft entweichen kann.

**6**



Das Kissen vorsichtig glattstreichen, um Restluft zu entfernen.

**7**



Kissen verschließen

## Welche Wassermenge ist für Sie richtig?

Messen Sie die richtige Wassermenge gemäß „Befüllungstabelle“ (unten) ab.

### BEFÜLLUNGSTABELLE

FESTIGKEITSGRAD	WASSERMENGE LITER
Weich	2 l
Mittel	3 l
Hart	4-5 l

Wir empfehlen anfangs den mittleren Festigkeitsgrad.  
ZU HART? - Etwas Wasser ablassen. ZU WEICH? - Mehr Wasser hinzugeben.

## Pflegeanleitung

- Wasser aus dem Kissen lassen.
- Maschinenwaschbar mit geringer Schleuderrzahl.
- Keine Bleiche verwenden.
- Zum Trocknen aufhängen.
- Nicht bügeln.
- NICHT CHEMISCH REINIGEN.

## Welche Wasserart sollte verwendet werden?

- Benutzen Sie kaltes oder lauwarmes Leitungswasser. Die Wassertemperatur sollte nicht höher sein als 38° C.
- Das Wasser kann maximal 1 Jahr im Kissen bleiben. Danach sollte es ausgewechselt werden.
- Wird Leitungswasser verwendet, brauchen keine Chemikalien hinzugegeben werden.
- Wird Brunnen- bzw. Quellwasser verwendet, kann ein Tropfen Bleiche in das Wasser gegeben werden.

### HERSTELLUNGSGARANTIE

Mediflow Inc. („Mediflow“) garantiert, dass das hierunter gelieferte Wasser-Kissen (das „Produkt“) vierundzwanzig (24) Monate nach dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird (die „Garantiezeit“). Unter Vorbehalt der hiernach aufgeführten Bedingungen willigt Mediflow hiermit ein, dem Käufer kostenlos ein Produkt zu ersetzen, das sich bei normalem und richtigem Gebrauch und Pflege in Bezug auf Material und Verarbeitung als fehlerhaft erweist. Mediflow weist ausdrücklich jegliche Haftung für Fern- oder Folgeschäden zurück, die durch den Gebrauch des Produktes entstehen. Mediflow's Haftung beschränkt sich auf den Ersatz. Kaufbeleg ist erforderlich (Kopie des Kassensbons mit dem echten UPC-Code). Die hierin gegebenen Garantien gelten nicht für Produkte, die durch den Käufer missbraucht oder falsch bzw. fahrlässig verwendet wurden. Solche Garantien stehen an Stelle von anderen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die stillschweigenden Garantien in Bezug auf die Marktgängigkeit des Produktes und seine Eignung für einen bestimmten Zweck. Zur Erbringung von Garantieleistungen wenden Sie sich bitte an [www.mediflow-wasserkissen.de/kontakt/](http://www.mediflow-wasserkissen.de/kontakt/)



Ein Video mit einer Anleitung zum richtigen Füllen finden Sie auf unserer Website unter [www.mediflow-wasserkissen.de](http://www.mediflow-wasserkissen.de)