


Directives sur la façon d'insérer l'eau

Voir le « Tableau de remplissage » ci-dessous pour la quantité d'eau à insérer.

Instrument à double fin: Utilisez comme clé pour enlever le bouchon.

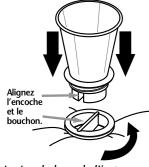

Insérez la base de l'instrument dans le bouchon de la valve et utilisez-la comme clé pour desserrer le bouchon. Tournez l'instrument dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez le bouchon.

Instrument à double fin : Utilisez comme entonnoir pour ajouter l'eau.



Remplissez la pochette d'une quantité d'eau mesurée en fonction du soutien désiré. Voir le Tableau de remplissage ci-dessous pour plus de détails

Directives sur la façon d'enlever une poche d'air

Enlevez l'entonnoir et procédez aux étapes de 4 à 7.



Très important!

Votre oreiller vous sera des plus avantageux une fois que l'air aura été entièrement enlevée de la pochette d'eau pour empêcher le clapotement d'eau. Tenez l'oreiller en position verticale et veuillez suivre les étapes de 5 à 7.

Avis spécial

Si vous entendez un clapotement d'eau lorsque vous mettez votre tête sur l'oreiller, suivez de nouveau les étapes 5, 6 et 7 pour enlever l'air restant.

Quelle est la quantité d'eau idéale pour vous ?

Insérez l'instrument dans

l'ouverture de la valve, serrez-le

et utilisez-le comme entonnoir.



Quelle sorte d'eau devriez-vous utiliser?

- Utilisez de l'eau froide ou tiède du robinet. La température de l'eau ne devrait pas dépasser 38 °C ou 100 °F.
- L'eau peut rester dans l'oreiller jusqu'à une période d'un an, puis elle devrait être changée.
- Aucun additif chimique n'est requis avec l'utilisation de l'eau du robinet.
- Si l'eau de puit est utilisée, une goutte d'eau de javel peut être ajoutée à l'eau.

Mesurez la quantité d'eau exacte selon le « Tableau de remplissage » ci-dessous.

TABLEAU DE REMPLISSAGE

NIVEAU	QUANTITÉ D'EAU		
DE SOUTIEN	Onces	(pintes)	Litres
Mou	60 à 80 oz	(2 ptes)	2 L
Moyen	80 à 100 oz	(3 ptes)	3 L
Ferme	100 à 130 oz	(4 à 5 ptes)	4 à 5 L


Nous pouvons peut-être vous suggérer de commencer avec le niveau de soutien moyen.

TROP FERME ? - Enlevez de l'eau. TROP MOU ? - Ajoutez de l'eau.

Directives d'entretien


- Videz l'eau de la pochette.
- Suspendez pour faire sécher.
- Lavez à la main en eau froide avec le bouchon en place.
- Ne pas repasser.
- 💢 Ne pas utiliser de l'eau de javel. 🏻 💢 NE PAS FAIRE NETTOYER À SEC.

Poussez doucement avec

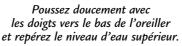



Aplatissez doucement la partie restante de la pochette d'un mouvement de balayage pour enlever la poché d'air.

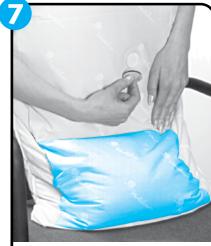

Continuez à exercer une légère pression sur la partie supérieure de la pochette et remettez le bouchon.

GARANTIE DE FABRICATION

Mediflow Inc. (« Mediflow ») garantit l'oreiller à base d'eau (le « Produit ») en votre possession contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant les vingt-quatre (24) mois suivant la date d'achat (la « période de garantie »). Sujet aux conditions précisées ci-après, Mediflow s'engage à remplacer gratuitement, pendant la période de garantie, le Produit qui comporte des défauts de matériel ou de fabrication, pourvu que le consommateur l'ait utilisé et entretenu de façon adéquate, conformément aux recommandations du fabricant. Mediflow se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait aux dommages indirects ou aux dommages-intérêts pouvant découler de l'utilisation du Produit. L'engagement de Mediflow se limite uniquement au remplacement de tout oreiller défectueux et une preuve d'achat est alors requise (copie de votre récépissé avec un CUP actuel).

Les garanties précitées ne sont pas en vigueur si le Produit a fait l'objet d'un mauvais usage ou de négligence ou s'il a été utilisé par le consommateur à des fins autres que celles prévues par le fabricant. De telles garanties remplacent toute autre garantie, implicite ou explicite, y compris les garanties implicites quant à la qualité loyale et marchande du Produit et la nature précise de l'usage pour lequel il a été conçu, sans toutefois y être limitées. Pour tout service en vertu de cette garantie, communiquez avec Mediflow au www.m